

# Инструкция по использованию Очиститель «Boule Hypochlorite (4 %) Cleaner»



## Назначение

Очиститель «Boule Hypochlorite (4 %) Cleaner», объем 100 мл, предназначен для использования с системой приборов Quintus, указанных далее, для корректирующей и профилактической очистки входных отверстий и трубок, контактирующих с кровью (белком).



## Краткое описание и принципы

Очиститель «Boule Hypochlorite (4 %) Cleaner» содержит гипохлорит в стабилизированном растворе с добавлением поверхностно-активных веществ (ПАВ). Гипохлорит и ПАВ растворяют белки и сгустки, в том числе и на поверхностях, что облегчает их удаление во время промывки. Очиститель и ПАВ могут оказывать дезинфицирующее действие, значительно сокращая количество жизнеспособных микроорганизмов. Использование очищающего раствора через указанные регулярные промежутки времени обеспечит низкий результат фонового подсчета (PLT) и более длительное время между ошибками.

## Хранение и стабильность

Очиститель «Boule Hypochlorite (4 %) Cleaner» можно транспортировать при температуре окружающей среды (избегая заморозки и выдерживая при комнатной температуре перед использованием). Длительное хранение при температуре выше 30 °C может привести к снижению моющей и дезинфицирующей активности продукта в связи со снижением концентрации гипохлорита. Всегда храните емкости в вертикальном положении во избежание утечек через крышку. При температуре хранения от 15 до 30 °C очиститель сохраняет стабильность минимум до даты истечения срока годности, указанной на этикетке.

## Инструкция по использованию

См. подробную информацию по использованию очистителя «Boule Hypochlorite (4 %) Cleaner» в разделе 9.1 «Ежедневная очистка» руководстве пользователя прибора Quintus.



**Примечание.** Помещаемый в ротор проб флакон должен содержать не менее 3 мл очистителя.

## Меры предосторожности

- Предназначен для диагностики *in vitro* на указанных выше приборах.
- Перед использованием ознакомьтесь с соответствующим Паспортом безопасности (SDS). SDS доступны на веб-сайте [www.boule.com](http://www.boule.com).

- Очиститель «Hypochlorite (4 %) Cleaner» относится к классу опасных для здоровья и окружающей среды веществ согласно CLP (Регламент ЕС № 1272/2008). Обязательная маркировка указана ниже, подробную информацию см. в SDS.

Пиктограмма опасности	
Сигнальное слово	<b>Опасно</b>
Краткие характеристики опасности	<b>H314</b> При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. <b>H410</b> Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
Меры предосторожности	<b>P260</b> Не вдыхать газ, пары, пыль или аэрозоли. <b>P273</b> Избегать попадания в окружающую среду. <b>P280</b> Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз или лица. <b>P303 + P361 + P353</b> ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой. <b>P305 + P351 + P338</b> ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. <b>P310</b> Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу.
Содержимое	Содержит: ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ, РАСТВОР АКТИВНОГО ХЛОРА ≥1–<5 %, ГИДРОХЛОРИД НАТРИЯ

- Утилизация очистителя должна проводиться в соответствии с требованиями местных нормативных актов. При сливе остатков раствора через канализацию всегда используйте большое количество воды. После промывки пластиковую емкость можно отправить на переработку.
- Раствор, проходящий через прибор во время очистки, будет собираться и утилизироваться вместе с общими отходами прибора.
- Этот продукт предназначен для использования в том виде, в котором он поставляется. Модификация путем разбавления или добавления каких-либо материалов к продукту делает продукт непригодным для IVD.

# Инструкция по использованию Очиститель «Boule Hypochlorite (4 %) Cleaner»



## Серьезные инциденты

В случае возникновения серьезного инцидента, связанного с продукцией компании Boule Medical, необходимо уведомить об этом дистрибьютора, производителя в лице компании Boule и компетентный орган государства — члена ЕС, в котором зарегистрированы пользователь и/или пациент.

## Данные для заказа и обслуживание

Для размещения заказов и получения поддержки обращайтесь к представителю Boule в вашей стране. Для заказа подготовьте номера по каталогу. Для получения любой другой помощи обратитесь в компанию Boule Medical AB по номеру телефона +46 8 7447700, факсу +46 8 7447720 или через веб-сайт [info@boule.com](mailto:info@boule.com).

Номер по каталогу (REF)	Описание	Упаковка
1504385	Очиститель «Boule Hypochlorite (4 %) Cleaner»	100 мл