

Οδηγίες χρήσης

Αντιδραστήρια Boule Quintus:

Quintus 5-part Diluent

Quintus 5-part Lyse

Quintus 5-part Stopper



Οδηγίες εγκατάστασης για αντιδραστήρια Quintus

Για λεπτομερή περιγραφή της εγκατάστασης αντιδραστηρίων / αλλαγής αντιδραστηρίων, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης του οργάνου, στην Ενότητα 2 Εγκατάσταση



Προβλεπόμενη χρήση

Τα αντιδραστήρια Quintus 5-part Diluent, Quintus 5-part Lyse και Quintus 5-part Stopper της Boule προορίζονται για χρήση με τα συστήματα αιματολογικού αναλυτή Quintus.



Αποθήκευση και σταθερότητα

Τα αντιδραστήρια Quintus της Boule παραμένουν σταθερά τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στις ετικέτες, όταν αποθηκεύονται σε θερμοκρασία μεταξύ 4 °C και 35 °C. Η σταθερότητα ανοικτού δοχείου είναι 3 μήνες εάν ακολουθούνται οι συστάσεις αποθήκευσης.

Προφυλάξεις

- Διαβάστε το σχετικό Φύλλο δεδομένων ασφάλειας (SDS) πριν από τη χρήση. Για τα SDS, ανατρέξτε στο www.boule.com.
- Το Quintus 5-part Diluent και το Quintus 5-part Lyse ταξινομούνται ως επικίνδυνα για την υγεία σύμφωνα με τον CLP [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008]. Η απαιτούμενη σήμανση παρέχεται παρακάτω. Αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στο SDS.

Quintus 5-part Diluent της Boule	
Εικονόγραμμα κινδύνου	
Προειδοποιητική λέξη	Προειδοποίηση
Κωδικοί και δηλώσεις επικινδυνότητας	H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Δηλώσεις προφύλαξης	P261 Μην αναπνέετε ατμούς, σταγονίδια ή εκνεφώματα. P280 Φοράτε προστατευτικά γάντια. P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό. P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε/επισκεφτείτε γιατρό. P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένους τόπους απομάκρυνσης χημικών αποβλήτων/συσκευασιών.
Συμπληρωματικές πληροφορίες	Περιέχει: MAZA ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ 5-ΧΛΩΡΟ-2-ΜΕΘΥΛΟ-2Η-ΙΣΟΘΕΙΑΖΟΛ-3-ΟΝΗΣ ΚΑΙ 2-ΜΕΘΥΛ-2Η-ΙΣΟΘΕΙΑΖΟΛ-3-ΟΝΗΣ (3:1)

Quintus 5-part Lyse της Boule	
Εικονόγραμμα κινδύνου	
Προειδοποιητική λέξη	Προειδοποίηση
Κωδικοί και δηλώσεις επικινδυνότητας	H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
Δηλώσεις προφύλαξης	P264 Πλύνετε σχολαστικά το ερεθισμένο δέρμα μετά το χειρισμό. P280 Φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα προστασίας για τα μάτια. P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευτείτε/επισκεφτείτε γιατρό. P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένους τόπους απομάκρυνσης χημικών αποβλήτων/συσκευασιών.
Συμπληρωματικές πληροφορίες	Περιέχει: MAZA ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ 5-ΧΛΩΡΟ-2-ΜΕΘΥΛΟ-2Η-ΙΣΟΘΕΙΑΖΟΛ-3-ΟΝΗΣ ΚΑΙ 2-ΜΕΘΥΛ-2Η-ΙΣΟΘΕΙΑΖΟΛ-3-ΟΝΗΣ (3:1)



Boule Medical AB
Domnarvsgatan 4
SE-163 53 Spånga, Sweden
E-mail: info@boule.com
www.boule.com

Οδηγίες χρήσης

Αντιδραστήρια Boule Quintus:

Quintus 5-part Diluent

Quintus 5-part Lyse

Quintus 5-part Stopper



- Το Quintus 5-part Stopper της Boule δεν θεωρείται επικίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον. Ανατρέξτε στο SDS για αναλυτικές πληροφορίες. Απαιτούμενη σήμανση:
EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. **EUH208** Περιέχει ΜΑΖΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ 5-ΧΛΩΡΟ-2-ΜΕΘΥΛΟ-2Η-ΙΣΟΘΕΙΑΖΟΛ-3-ΟΝΗΣ ΚΑΙ 2-ΜΕΘΥΛ-2Η-ΙΣΟΘΕΙΑΖΟΛ-3-ΟΝΗ (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Σοβαρό περιστατικό

Εάν προκύψει ένα σοβαρό περιστατικό σε σχέση με το προϊόν της Boule Medical, πρέπει να σταλεί ειδοποίηση στον διανομέα, στον κατασκευαστή Boule και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής

Οδηγίες

1. Για βέλτιστη απόδοση **MHN** αναμειγνύετε αντιδραστήρια της Boule με προϊόντα άλλων κατασκευαστών εκτός της Boule.
2. Συνιστάται η τοποθέτηση των αντιδραστηρίων Diluent, Lyse και Stopper στο ύψος του οργάνου ή κάτω από αυτό.
3. Το αλληλοσυνδεδεμένο σύστημα αντιδραστηρίων εμφανίζει μηνύματα ενδείξεων και προειδοποιήσεων για να ειδοποιήσει τον χειριστή όταν τα αντιδραστήρια έχουν σχεδόν εξαντληθεί και χρειάζονται αντικατάσταση. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, πραγματοποιήστε τα ακόλουθα:
 - a. Από το Κύριο μενού επιλέξτε [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ] και έπειτα [ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ].
 - b. Πατήστε [ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ].
 - c. Πατήστε το πλαίσιο κειμένου κάτω από το αντιδραστήριο που πρόκειται να σαρώσετε για εισαγωγή (επισημαίνεται με κίτρινο χρώμα όταν είναι ενεργοποιημένο) και, στη συνέχεια, σαρώστε το γραμμωτό κωδικό από το αντίστοιχο δοχείο αντιδραστηρίου.
 - d. Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλα τα χρησιμοποιούμενα αντιδραστήρια.
 - e. Πατήστε [ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ] για αποθήκευση.
 - f. Επιλέξτε [ΕΞΟΔΟΣ] για να επιστρέψετε στο Κύριο μενού.
 - g. Αφαιρέστε το πόμα και τη σφράγιση από το νέο δοχείο αντιδραστηρίου.

- h. Μεταφέρετε τον αισθητήρα στάθμης του αντιδραστηρίου από το χρησιμοποιημένο δοχείο στο νέο δοχείο αντιδραστηρίου.
- i. Είναι σημαντικό κατά τη μεταφορά, η σωλήνωση αντιδραστηρίων να παραμένει καθαρή και τοποθετημένη στο εσωτερικό του σωστού δοχείου αντιδραστηρίου.
- j. Ο αναλυτής είναι πλέον έτοιμος να συνεχίσει τη λειτουργία του ή να αναλύσει δείγματα. Δεν απαιτείται κύκλος αρχικής πλήρωσης ή πλήρωσης όταν τοποθετείτε νέο δοχείο αντιδραστηρίου, εφόσον ακολουθούνται οι ενδείξεις και τα προειδοποιητικά μηνύματα.
- k. Εκτελέστε τρεις (3) ΚΥΚΛΟΥΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ για να ολοκληρώσετε την αντικατάσταση του αντιδραστηρίου και για να ελέγξετε εάν το υπόβαθρο βρίσκεται κάτω από το αποδεκτό όριο.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανατρέξετε στο Εγχειρίδιο Χρήσης Quintus για πληροφορίες σχετικά με την αρχική πλήρωση ή την αντικατάσταση αντιδραστηρίων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μην παραλείψετε να επαληθεύσετε τη βαθμονόμηση πριν εκτελέσετε τα δείγματα ασθενών, π.χ. χρησιμοποιώντας ένα υλικό ελέγχου της Boule.

Πληροφορίες για τις παραγγελίες και την τεχνική υποστήριξη

Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Boule για παραγγελίες και τεχνική υποστήριξη. Κατά την παραγγελία έχετε πρόχειρο τον αριθμό καταλόγου. Για οποιαδήποτε απορία, καλέστε την Boule Medical AB στο τηλέφωνο +46 8 7447700 ή επικοινωνήστε μέσω φαξ +46 8 7447720 ή στο info@boule.com.

REF	Περιγραφή	Συσκευασία
1504291	Quintus 5-part Diluent	20 L
1504292	Quintus 5-part Lyse	5 L
1504373	Quintus 5-part Stopper	1 L

