



# Cargador automático para hasta 2 × 20 muestras. Puede cargarlo y marcharse.

El analizador hematológico Medonic™ M32 viene cargado de innovadoras tecnologías y funciones. El analizador proporciona 22 parámetros, incluido un hemograma completo (CBC) y un diferencial en 3 partes de los glóbulos blancos (WBC), además de una exactitud y fiabilidad excepcionales en cuestión de apenas un minuto. Medonic M32S con cargador automático es apto para laboratorios pequeños y medianos con volúmenes de pruebas superiores a la media.

## Un analizador autónomo

El modelo Medonic M32S de alta gama es capaz de analizar un lote entero de muestras por sí mismo. Basta con precargar hasta 2 × 20 muestras y dejar que el analizador haga su trabajo. El cargador automático es una función que ofrecen otros fabricantes, pero a menudo es necesario adquirir equipos más grandes y costosos que también cuestan más de operar.

Las ruedas de muestras pueden alojar 20 tubos estándar de 4 a 5 ml. Además, también tiene a su disposición ruedas de muestras diseñadas específicamente para tubos Sarstedt. Medonic M32S no es solo un equipo compacto, sino que también resulta sencillo de utilizar.



Los tubos se cargan fácilmente en la rueda de muestras.

# Análisis de un lote completo de muestras

## Moderna interfaz gráfica de usuario

La interfaz de usuario, común para todos los modelos de analizador Medonic M32, presenta un monitor táctil de 7 pulgadas que incorpora una pantalla a color WVGA de 800 × 480 píxeles con vista apaisada. Su diseño limpio y estructurado favorece un funcionamiento óptimo del cargador y una evaluación precisa de los resultados.



## Software diseñado para simplificar procesos de trabajo

El potente software mantiene a los M32S en la primera línea del análisis hematológico automatizado, simplificando los procesos de trabajo y ofreciendo a los usuarios un mejor control de los resultados de las muestras y los registros de los pacientes. El sistema de menús es fácil de entender y permite una sencilla navegación.

## Sencillo funcionamiento guiado

El análisis de una muestra de sangre venosa con el cargador automático M32S es muy sencillo.

1. Desbloquee la rueda de muestras, cargue los tubos con las etiquetas de código de barras orientadas hacia el analizador y vuelva a cargar la rueda en el analizador.
2. Pulse un botón para iniciar el dispositivo de muestreo. Se ofrecen dos opciones: mezcla de 1 minuto si los tubos ya se han mezclado bien o posibilidad de definir un tiempo de mezcla adicional de 15 minutos. La mayoría de las funciones están preconfiguradas.
3. El lector de código de barras interno lee automáticamente los ID de las muestras. Si los tubos no tienen etiqueta de código de barras, los ID de las muestras también se pueden registrar manualmente en una lista de trabajo.
4. El estado de la muestra, así como la información sobre su posición, secuencia, ID de muestra y perfil, se visualizan en el menú de lista del dispositivo de muestreo.
5. Consulte y evalúe los resultados.

## Medonic M32 – Un sistema hematológico infalible

Todos los modelos del analizador hematológico Medonic M32 son rápidos y fáciles de utilizar. Además, el analizador ofrece una elevada fiabilidad, una supervisión de calidad integrada y un bajo mantenimiento del equipo. Tampoco hay que olvidar que Medonic M32S ofrece una función exclusiva con el adaptador de micropipeta (MPA). Basado en una sencilla muestra de punción capilar tomada directamente del paciente, la función MPA ofrece un recuento CBC y un diferencial de WBC en 3 partes en solo un minuto.

**Contacte con nosotros para más información sobre el sistema Medonic M32**

**boule.com**

Medonic es una marca comercial de Boule Medical AB.  
© 2022 Boule Diagnostics AB  
Boule Diagnostics AB, Domnarvsgatan 4, SE-163 53 Spånga, Suecia BPM27836-3\_ES 08/2022

