



Del muestreo al hemograma completo en aproximadamente 1 minuto

El analizador hematológico Medonic™ M32 está dotado de funciones avanzadas. Tanto en consultas de doctores como en laboratorios pequeños y unidades clínicas de tamaño medio, el sistema ofrece un CBC en 3 partes con 22 parámetros y se caracteriza por una destacada facilidad de manejo, precisión y fiabilidad.

Asimismo, cabe destacar la amplia variedad de entradas de muestreo que ofrece el analizador Medonic M32: de tubo abierto, predilución, tubo cerrado, cargador automático y adaptador de micropipeta (MPA).

El método de MPA, basado en una sencilla muestra de punción capilar extraída directamente del paciente, es una función exclusiva de los analizadores hematológicos actuales.

Adaptador para MPA: solo se necesitan 20 μ l

Basta con realizar una punción capilar, extraer sangre en el microcapilar de 20 μ l, deslizar el tubo en el adaptador e insertarlo en el analizador. El análisis empieza automáticamente. En aproximadamente

un minuto ya tendrá en la pantalla táctil el recuento sanguíneo completo. No requiere ningún tipo de preparación, predilución, tubos de vacío ni agujas. Así de simple.



La entrada del adaptador de micropipeta MPA es una manera rápida y fácil de obtener CBC completos.

Con una simple muestra podrá ver los resultados en forma de gráfico con todos los parámetros




1. Tome una muestra de sangre mediante punción digital.



2. Extraiga hasta 20 µl en un tubo microcapilar recubierto con K2EDTA.



3. Deslice el tubo en el adaptador.

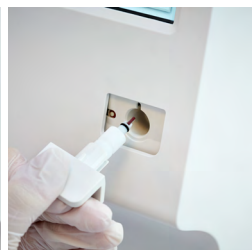

4. Introdúzcalo en el analizador.



5. Obtenga los resultados en apenas un minuto.


Diseñado especialmente para niños y bancos de sangre

Dado que la punción capilar es prácticamente indolora, el MPA resulta idóneo para tomar y analizar muestras sanguíneas de niños u otros pacientes. En el caso de los bancos de sangre, esta función constituye una herramienta excelente para realizar determinaciones rápidas de células sanguíneas antes de la donación. Además, permite reservar la vena para la donación.

Recuentos sanguíneos sin riesgos

El analizador hematológico Medonic M32 combina unas excelentes funciones con una flexibilidad sin precedentes. Rápido y fácil de utilizar, los resultados que genera se caracterizan por una elevada fiabilidad, una supervisión de la calidad integrada y un mantenimiento escaso del equipo. Además, la solución, formada por equipos, reactivos y materiales de CC, garantiza un rendimiento excepcional en todo momento.

Tres modelos del analizador incluyen el método de muestreo MPA... además de muchas más funciones inteligentes

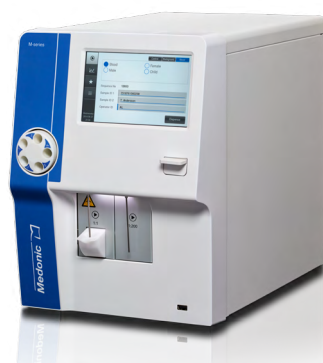

Medonic M32M: el mezclador de cinco muestras está personalizado para consultorios médicos y laboratorios pequeños.



Medonic M32C: el muestreo de tubo cerrado minimiza el riesgo de contaminación de la sangre.



Medonic M32S: cargador automático para hasta 2 x 20 muestras. Puede cargarlo y marcharse.

Contacte con nosotros hoy para conocer más detalles sobre el analizador hematológico Medonic M32 y el método MPA para el análisis sanguíneo.

boule.com

Medonic es una marca comercial de Boule Medical AB.
© 2022 Boule Diagnostics AB
Boule Diagnostics AB, Domnarvsgatan 4, SE-163 53 Spånga, Suecia
BPM27577-3_ES 08/2022